



Software



TRACECARE®

Tracciabilità
Reportistica
Monitoraggio



Healthcare



Life Science



Cisa Group



Cisa Group è un fornitore globale di sistemi di controllo delle infezioni con stabilimenti produttivi in Italia e Brasile.

Fondata nel 1947, Cisa Group, assieme a Cisa America e Cisa Brasile forma un gruppo internazionale, che si posiziona tra i principali produttori al mondo di tecnologie di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione per il controllo delle infezioni in ambito sanitario e life science.



SETTORE
SANITARIO



SETTORE
LIFE SCIENCE

La creazione di ambienti più sicuri negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle applicazioni di laboratorio è una priorità fondamentale per il benessere degli esseri umani in tutto il mondo.

Questo è l'impegno che spinge Cisa Group al suo claim:

We care about life

Cisa Group fa parte di Faper Group, una realtà italiana leader nella fornitura di soluzioni ingegneristiche innovative di altissimo livello.

Il Gruppo si ispira al suo fondatore, Fabio Perini, che ha basato il suo successo sulla capacità di coniugare invenzione e semplicità.

Faper Group nasce nel 2001 come holding dedicata all'innovazione nei settori della trasformazione della carta tissue, della sanità e della gestione immobiliare.

DIRETTIVE APPLICATE

93/42/EC
2007/47/EC
2006/42/EC
2014/30/UE
2014/35/UE
PED 2014/68/UE

NORME APPLICATE AL PRODOTTO

EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 60204-1
EN 61326-1
EN 13445
EN 285
EN ISO 15883-1,-2,-6

SISTEMA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485



**MAGGIORI
INFO
SUL SITO
FAPER GROUP**



Le tecnologie

Healthcare



Cisa Group sviluppa tecnologie avanzate per l'infezione control, la salvaguardia degli operatori sanitari e la salute dei pazienti.

Centrali complete di sterilizzazione per ospedali (CSSD)

Sterilizzazione per applicazioni sanitarie e cliniche di ogni dimensione

Tecnologie di disinfezione e lavaggio per diverse esigenze operative

Cisa Group è il partner tecnologico ideale per scienziati, ricercatori e ingegneri che ogni giorno sviluppano prodotti che migliorano la vita.



Life Science



Tecnologie di lavaggio e sterilizzazione per laboratori e centri di ricerca

Sterilizzazione per la produzione farmaceutica

Waste



Cisa Group, con 15 anni di esperienza nel trattamento dei rifiuti ospedalieri infettivi, fornisce soluzioni innovative, sicure, economiche e carbon friendly. È leader nel settore con l'invenzione WSD® (Waste Sterilization Department).

WSD. Centrali complete di trattamento dei rifiuti sanitari

WSM. Sterili-Station plug and play in container

Nel corso degli anni Cisa Group ha sviluppato esclusivi sistemi informatici proprietari.



Software



Tracecare®. Tracciabilità del processo di sterilizzazione per il ricondizionamento dei kit chirurgici nelle centrali ospedaliere (CSSD).

TraceWaste. Tracciabilità del processo di sterilizzazione nel trattamento dei rifiuti infettivi nelle WSD.

TraceCare®

La soluzione Cisa per la riduzione del rischi oclinico

TraceCare® è il sistema/software modulare sviluppato da Cisa Group, che consente la completa tracciabilità all'interno della centrale di sterilizzazione e del blocco operatorio (OT). Il sistema supporta gli operatori nella corretta gestione del rischio clinico.

É una soluzione basata su una architettura web-based e sull'utilizzo di dispositivi mobili, sviluppata per adattarsi completamente alle diverse esigenze delle strutture ospedaliere.

TraceCare® consente la corretta identificazione degli assets, dei kit e degli operatori durante tutto il processo di ricondizionamento dello strumentario chirurgico in modo comodo e flessibile.

I dispositivi mobili consentono con pochi e semplici passaggi la registrazione di tutte le operazioni e le movimentazioni all'interno delle aree della CSSD (area sporca, area pulita, area sterile) fino ai magazzini ed alle sale dell' OT.

L'utilizzo dei dispositivi mobili sanificabili permette di ridurre l'interazione tra operatori e tastiera del computer e in questo modo di limitare la cross-contaminazione.

L'unica fase del processo supportata dall'ausilio di un PC è quella di ricomposizione nella quale l'operatore ha a disposizione un ampio monitor e può gestire facilmente la fase di verifica del contenuto dei kit e visionare più attentamente tutti gli elementi. I PC sono utilizzati anche per la gestione dell'anagrafica, per il monitoraggio delle macchine e per la produzione di report.

La connessione diretta con i PLC delle macchine Cisa Group consente l'acquisizione dei dati del ciclo in tempo reale, permettendo ai responsabili della centrale un controllo immediato dello stato delle macchine ed una gestione proattiva del processo in corso.

Sfruttando tecnologie di identificazione standard (quali barcode e data matrix), TraceCare® traccia ogni movimentazione di un kit adottando il concetto delle 4W. Per ogni operazione si registra infatti:

Who: chi esegue l'operazione

Where: dove viene eseguita l'operazione (in che postazione/macchina)

What: cosa viene movimentato (l'identificativo univoco dello specifico kit)

When: quando viene eseguita l'operazione

L'architettura web-based di TraceCare® lo rende adatto alla gestione di più presidi ospedalieri con un'unica installazione (multi-site), dove ognuno dei presidi ha la propria anagrafica indipendente.

TraceCare® consente un ulteriore grado di personalizzazione: sempre con un'unica installazione, è possibile la gestione di più centrali di sterilizzazione appartenenti ad uno stesso presidio (multi-centrale), in questo caso le centrali condividono l'anagrafica.

È progettato anche per sfruttare i vantaggi di architetture software orientate ai servizi (SOA), è infatti predisposto per potersi interfacciare a sistemi per la gestione della sala operatoria, delle cartelle cliniche, ERP, HIS e simili. Questo è possibile sviluppando protocolli di comunicazione ad-hoc o sfruttando standard internazionali come HL7.

Il sistema TraceCare®, basandosi quindi su un'installazione centralizzata, consente, in accordo con i sistemi informativi degli ospedali, una gestione facilitata nel supporto tecnico da remoto del personale di assistenza Cisa Service.

CSSD e TraceCare®

All'interno della CSSD (Central Sterile Services Department) vengono trattate le forniture e le attrezzature mediche/chirurgiche utili alle cure del paziente.

TraceCare® è il sistema di tracciabilità sviluppato da Cisa, che nella sua versione completa consente di gestire e monitorare il processo dei kit attraverso le aree (area sporca, area pulita, area sterile) che compongono la CSSD.

FASI/POSTAZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO



Tracciabilità


In qualsiasi CSSD, la tracciabilità, che sia manuale o assistita, è un processo obbligatorio che deve essere seguito dal personale ospedaliero.

Il sistema di tracciabilità sviluppato da CISA consente il monitoraggio del kit durante tutte le fasi nelle aree della CSSD.

I tre settori principali in cui è divisa l'unità di sterilizzazione, sporco, pulito e sterile, sono fisicamente divisi e le macchine rappresentano il punto di passaggio da un settore ad un altro.

TraceCare® estende la tracciabilità anche all' OT consentendo di seguire il flusso di un kit nei magazzini e nelle sale dell' OT stesso.

A seguire uno schema riassuntivo che mostra i punti chiave (passaggio tra CSSD, OT e viceversa), nei quali vengono tracciati i kit.

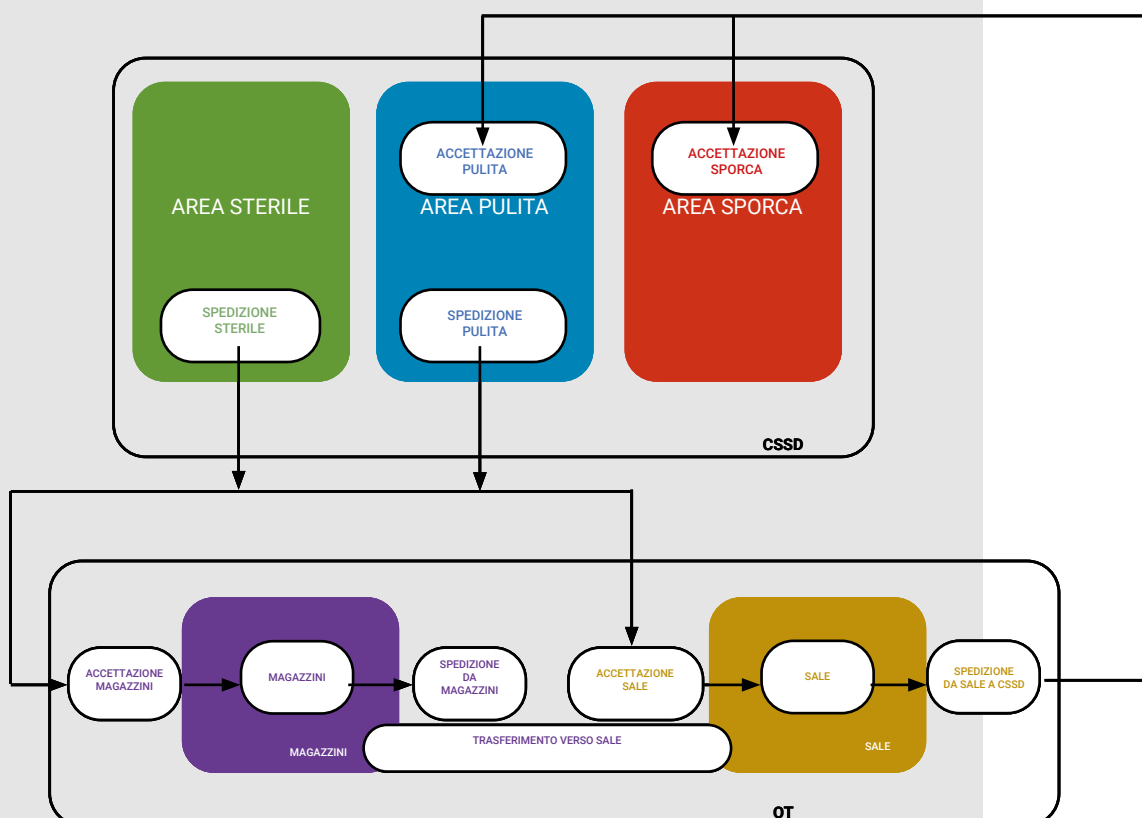

A seguire la lista delle operazioni standard che compongono il processo tipico seguiti dai kit in CSSD/OT.

CSSD AREA SPORCA

| FASE | DESCRIZIONE | STEP | DEVICE |
|-----------------------------|---|--|---------|
| Accettazione kit sporco | Accettazione kit utilizzato proveniente dall'OT | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Lavaggio manuale | Lavaggio manuale del kit | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Lavaggio ad ultrasuoni | Lavaggio ad ultrasuoni del kit | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Carico macchina di lavaggio | Carico del kit nella macchina di lavaggio | Lettura di: codice operatore, codice macchina, codice kit, numero ciclo | Palmare |
| Kit Esterni | Etichettatura rapida dei kit esterni non in anagrafica (noleggio) | Letto di codice operatore, accettazione in area pulita/ sporca e stampa dell'etichetta | Palmare |

CSSD AREA PULITA

| FASE | DESCRIZIONE | STEP | DEVICE |
|---|---|---|---------|
| Scarico macchina di lavaggio | Scarico del kit dalla macchina di lavaggio | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Accettazione Pulita | Accettazione di un kit pulito ma non sterile direttamente in Area Pulita | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Spedizione Pulita | Spedizione del kit da area pulita | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Composizione del kit | Fase di ricomposizione del kit (inteso come insieme di strumenti secondo il modello registrato in anagrafica) | Inserimento del codice kit modello, generazione del kit con codice specifico della ricomposizione corrente, verifica strumenti, stampa dell'etichetta del kit appena creato | PC |
| Etichettatura e confezionamento del kit | Fase di etichettatura e confezionamento del kit | Inserimento del codice kit modello, generazione del kit con codice specifico del confezionamento corrente, stampa dell'etichetta del kit appena creato | PC |
| Carico autoclave | Carico del kit nell'autoclave | Lettura di: codice operatore, codice macchina, codice kit, numero ciclo, tipo di ciclo | Palmare |

CSSD AREA STERILE

| FASE | DESCRIZIONE | STEP | DEVICE |
|-------------------|--|--|---------|
| Scarico autoclave | Scarico del kit dall'auto-clave | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Spedizione | Spedizione del kit dal magazzino sterile della CSSD verso l'OT | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |

OT - MAGAZZINI

| FASE | DESCRIZIONE | STEP | DEVICE |
|------------------------|--|---|---------|
| Accettazione Magazzino | Accettazione del kit in un magazzino dell'OT | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Spedizione Magazzino | Spedizione del kit fuori dal magazzino dell'OT verso una sala o di nuovo verso la CSSD | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Trasferimento Sala | Movimentazione diretta del kit da un magazzino di blocco ad una sala dell'OT | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit, codice sala di destinazione | Palmare |

OT - SALE

| FASE | DESCRIZIONE | STEP | DEVICE |
|-------------------|--|---|---------|
| Accettazione Sala | Accettazione del kit in una sala dell'OT | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |
| Spedizione Sala | Spedizione del kit da una sala dell'OT verso la CSSD | Lettura di: codice operatore, codice postazione, codice kit | Palmare |

La rete TraceCare®


TraceCare® essendo un sistema web-based consente l'accesso agli operatori da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

Il sistema è composto da un backoffice (Java EE) e da un frontoffice compatibile con dispositivi mobili su piattaforma Android.

TraceCare® consente la comunicazione diretta con i PLC delle macchine Cisa, usando un protocollo di comunicazione proprietario.

Il sistema consente l'autenticazione degli utenti mediante protocollo standard LDAP.

Segue un'architettura sommaria del sistema dove è visibile l'hardware ed il software necessario aggiungere a seconda del pacchetto prescelto.

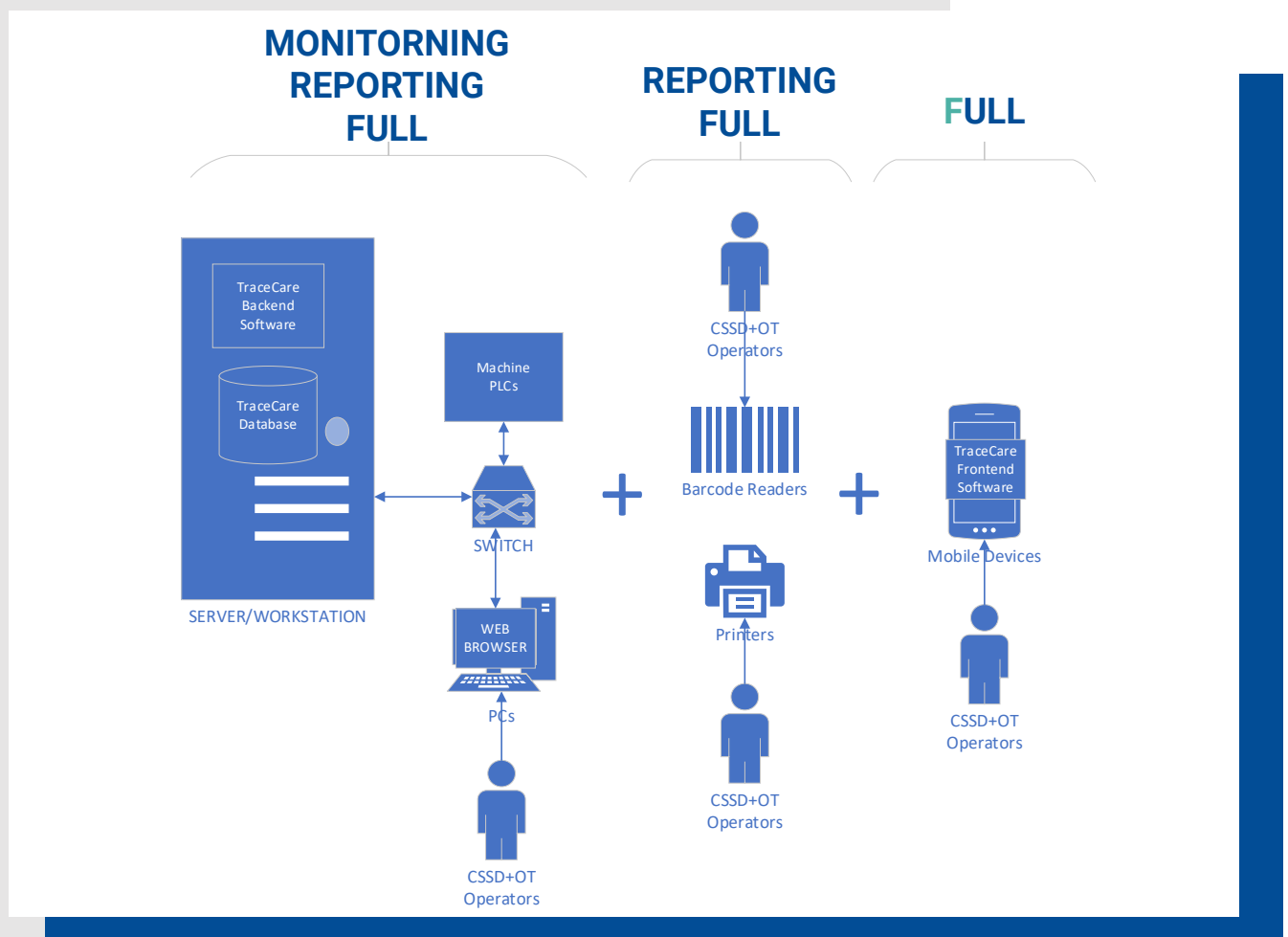

Possono essere identificati i seguenti elementi software:

- Applicazione Android Front-Office
- Applicazione Web-based Windows Back-Office
- Data Base (DB)

Possono essere identificati i seguenti elementi hardware:

- Server
- PC clients
- Mobile devices
- Printers
- Barcode readers
- Network SWITCH (LAN)
- Machine Eth PLCs

Versioni/Pacchetti

● **MONITORING**

● **REPORTING**

● **FULL**

Il sistema offre una serie di pacchetti a seconda delle esigenze del cliente.

MONITORING

La versione Monitoring consente il monitoraggio ed il salvataggio dei cicli delle macchine presenti all'interno della CSSD. I dati riguardanti i principali parametri del ciclo vengono salvati nel DataBase e possono essere visualizzati sotto forma di grafici o mostrati in report riassuntivi. La comunicazione tra TraceCare® ed il PLC delle macchine è unidirezionale per cui il sistema è in grado di leggere le informazioni dalle macchine ma non può inviare comandi preservando possibili alterazioni ai dispositivi medicali.

REPORTING

La versione Reporting possiede tutte le funzionalità del pacchetto Monitoring. In aggiunta consente di tracciare le attività di sterilizzazione consentendo la creazione di etichette da apporre sui kit e registrando le operazioni di carico nelle autoclavi. Questa versione prevede inoltre la possibilità di visualizzare e stampare report aggiuntivi legati appunto alle attività di carico delle autoclavi.

FULL

La versione Full possiede tutte le funzionalità dei pacchetti precedenti. Oltre a ciò, permette di tracciare tutte le attività della CSSD. In questa versione vengono utilizzati anche i dispositivi mobili che consentono un tracciamento snello durante l'avanzamento dei kit nel flusso di processo della CSSD, ed opzionalmente nell'OT.

La sezione dei report è ampliata da ulteriori report dettagliati che descrivono le attività della centrale.

La versione Full può includere opzionalmente una serie di funzionalità:

- Estensione della tracciabilità, mediante i dispositivi mobili, anche nei magazzini e nelle sale dell'OT
- Interfacciamento al sistema di pianificazione interventi di partner Cisa, secondo protocollo standard hl7
- Schedulazione ottimizzata delle attività della CSSD mediante sistemi di tipo MES
- Scalabilità della soluzione a seconda del numero di presidi interessati, unica istanza di TraceCare® per la gestione di più presidi con anagrafiche indipendenti (funzionalità multisite)
- Scalabilità anche per la gestione di più centrali di sterilizzazione all'interno di uno stesso presidio che vogliono condividere l'anagrafica (funzionalità multi-centrale).

Requisiti HW/SW



Configurazioni HW minime

SERVER

CPU: i5 Family / Xeon E5-2420 o superiore
RAM: 8 GB o superiore
HDD: 500 GB o superiore

CLIENT

CPU: i5 Family o superiore
RAM: 8 GB o superiore
HDD: 500 GB o superiore

BARCODE PRINTER

Zebra ZD230

MOBILE DEVICE

Zebra TC21HC/TC26HC

Configurazioni SW

SERVER

Sistema Operativo:
Windows 10 / Windows server 2012
o superiori
Apache Tomcat 7
Java 1.7u80
Oracle 11g (XE o R2)
JasperServer 5.6.0


CLIENT

Sistema Operativo:
Windows 10 o superiore
Browser: Chrome or FireFox

MOBILE DEVICE

Android 10

TRACECARE[®] 2.0

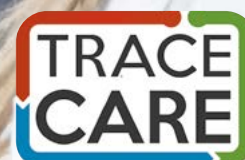

Nuova realese.
Più facile, più veloce,
più affidabile.





KEEP IN TOUCH



+39 0583 15381



info@cisagroup.it



Cisa Group



cisagroup.it



© Copyright CISA 2023
Tutti i diritti riservati. Per ulteriori dettagli, visitare
la sezione Download del sito web



Cisa Production S.r.l. Unipersonale

Via Enrico Mattei snc, Angolo Via la Viaccia
55100 Lucca, Italy

Revisione 05 Settembre 2023



Azienda
con sistema
di gestione qualità
certificato